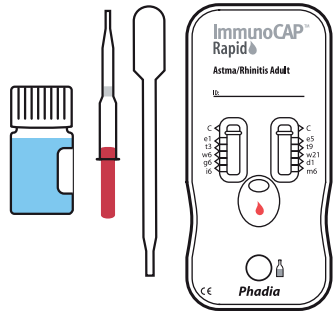
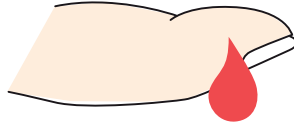
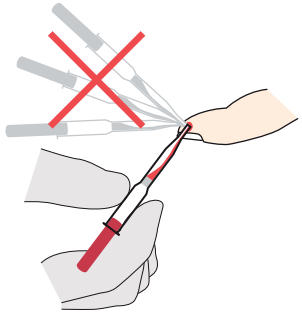
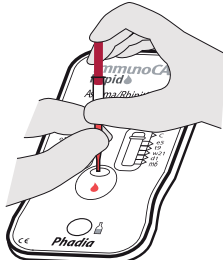
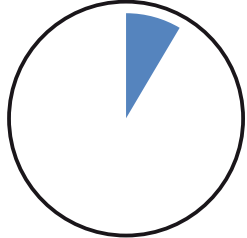
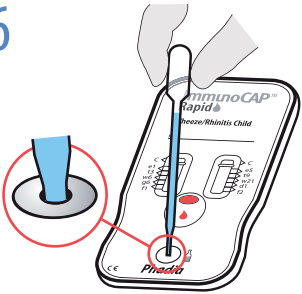
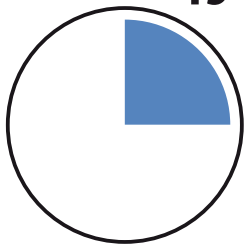
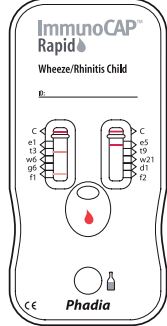



Déroulement du test

<p>1</p>  <p>Kit comportant les réactifs et le matériel nécessaire.</p>	<p>2</p>  <p>Réchauffer un court instant le doigt du patient. Choisir une lancette qui garantit un bon écoulement du sang. Piquer le bout du doigt.</p>	<p>3</p>  <p>Recueillir le sang à l'aide du matériel de prise de sang. Pendant le prélèvement, tenir l'ustensile légèrement incliné vers le bas et de ne pas obstruer l'orifice à l'extrémité du piston, en rouge.</p>
<p>4</p>  <p>Placer le testeur sur une surface horizontale. Vider le sang dans le porte-échantillon marqué d'une goutte rouge. Pour cela, placer le doigt sur l'ouverture à l'extrémité du piston et appuyer doucement pour transvaser le sang.</p>	<p>5</p>  <p>Régler un minuteur sur cinq minutes.</p>	<p>6</p>  <p>Au bout de cinq minutes, verser 0,5ml de la solution de révélateur dans la cavité marquée d'une petite bouteille. Utiliser pour cela la pipette fournie avec le testeur et en enfoncer la pointe dans la cavité.</p>
<p>7</p> <p>15</p>  <p>Régler de nouveau le minuteur sur 15 minutes. Une ligne rouge-rosé apparaît alors dans les deux fenêtres de contrôle (C).</p>	<p>8</p>  <p>Lire les résultats au bout de 15 minutes. Un résultat est positif si une ligne rouge-rosé apparaît à côté du code de l'allergène correspondant.</p>	<p>9 Exemples de résultats positifs</p>  <p>L'intensité de la couleur indiquant un résultat positif peut varier du rose clair au rouge sombre.</p>

Des résultats directs – simple et clair

ImmunoCAP® Rapid établit le profil IgE des enfants et adultes présentant des symptômes de ronchus/asthme ou de rhinite. Il suffit d'introduire le sang dans l'appareil pour obtenir en 20 minutes un résultat lisible sous forme de ligne rouge. Le médecin peut ainsi discuter des possibilités de traitement et des mesures ultérieures avant même que le patient ait quitté son cabinet.

Phadia