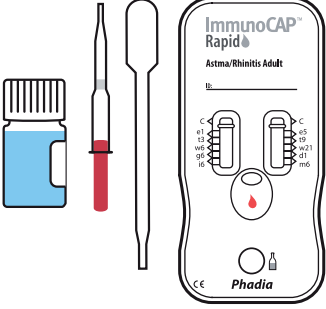
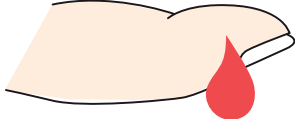
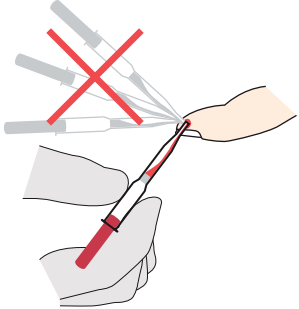
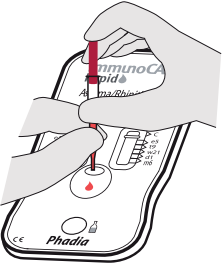
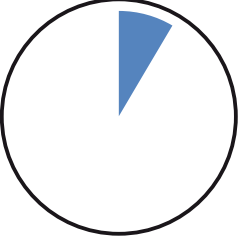
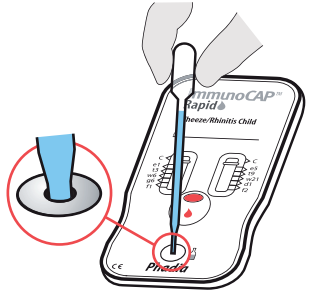
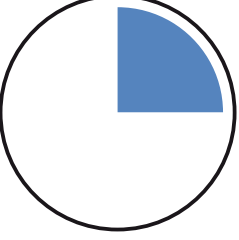
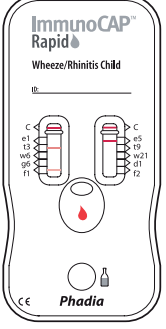



Testablauf

<p>1</p>  <p>Reagenzien und Material im Kit.</p>	<p>2</p>  <p>Den Finger des Patienten kurz anwärmen. Benutzen Sie eine Lanzette, die einen guten Blutfluss gewährleistet. Stechen Sie in die Fingerspitze.</p>	<p>3</p>  <p>Fangen Sie das Blut mit dem Blutentnahmegesäß auf. Halten Sie es bei der Probenentnahme leicht nach unten und decken Sie das Loch am Ende des roten Kolbens während der Blutentnahme nicht ab.</p>
<p>4</p>  <p>Legen Sie das Testgerät auf eine horizontale Fläche. Füllen Sie das Blut in den Probenträger, der mit einem roten Tropfen markiert ist. Legen Sie dabei Ihren Finger auf das Loch am Ende des Kolbens und drücken Sie vorsichtig die Blutprobe aus.</p>	<p>5</p>  <p>Stellen Sie eine Stoppuhr auf fünf Minuten.</p>	<p>6</p>  <p>Nach 5 Minuten: Füllen Sie 0,5ml Entwicklerlösung in die Vertiefung, die mit einer Flasche markiert ist. Benutzen Sie dazu die mitgelieferte Pipette und drücken Sie die Flüssigkeit behutsam aus.</p>
<p>7</p> <p>15</p>  <p>Stellen Sie nun die Stoppuhr auf 15 Minuten. In dieser Zeit erscheint in beiden Kontrollfenstern (C) eine rosa bis rote Linie.</p>	<p>8</p>  <p>Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten ab. Ein positives Ergebnis zeichnet sich durch eine rosa-rote Linie neben dem spezifischen Allergencode aus.</p>	<p>9 <i>Beispiele von positiven Ergebnissen</i></p>  <p>Die Farbintensität eines positiven Resultates kann zwischen leicht rosa und dunkelrot variieren.</p>

Ergebnisse direkt – klar und einfach

ImmunoCAP[®] Rapid erstellt ein IgE-Allergie-Profil für Kinder und Erwachsene mit Symptomen von Giemen/Asthma oder Rhinitis. Sie füllen nur das Blut in den Probenträger und nach 20 Minuten ist das Ergebnis als rote Linie sichtbar. Dann diskutieren Sie Behandlungsmöglichkeiten und weiterführende Massnahmen noch bevor der Patient Ihre Praxis verlässt.

Phadia

Bestellnummer:
82-1000-01
1 Kit à 10 Stück

Phadia AG
Sennweidstr. 46
6312 Steinhausen
Tel: +41 (0)43 343 40 50
Fax: +41 (0)43 343 40 51
www.immunocaprapid.com