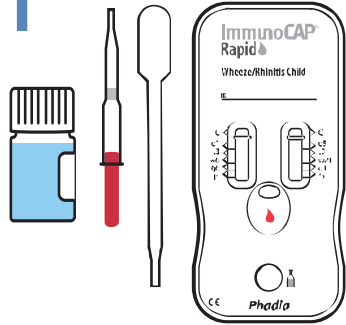
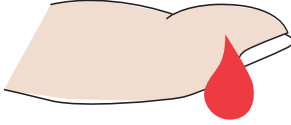
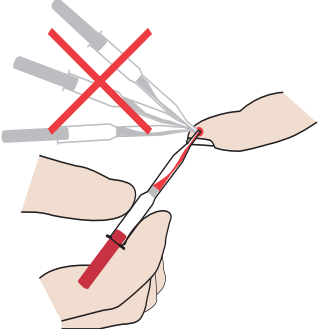
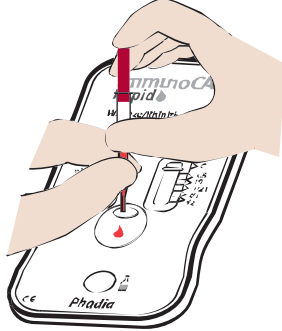
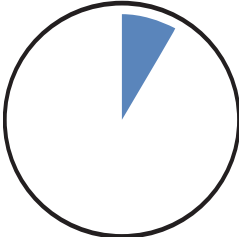
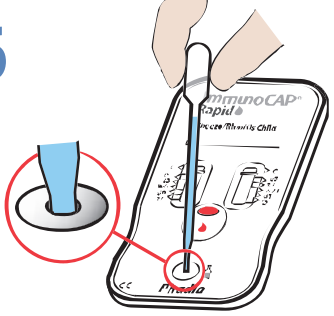
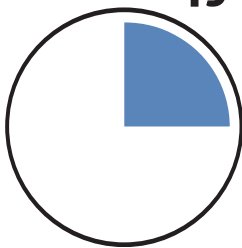
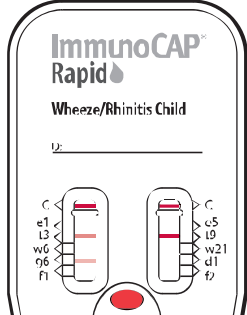



# Procedura d'esecuzione del test

<p><b>1</b></p>  <p>Reagenti e materiali forniti.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Scaldare la punta del dito. Lavare e asciugare l'estremità del dito. Pungere la punta del dito con la lancetta.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Raccogliere il sangue usando il Dispositivo del Campione di Sangue eparinizzato fino a dove indicato.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Riempire attentamente il Dispositivo per Campione di Sangue nel pozzetto, spingendo gentilmente verso il basso lo stantuffo con un dito che copre il foro dello stantuffo.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Puntare il timer per cinque minuti.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Riempire la pipetta fornita fino al segno superiore con 500 µl di Soluzione di Sviluppo. Aggiungere la Soluzione di Sviluppo nel pozzetto apposito, appoggiando la punta della pipetta al fondo del pozzetto.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Puntare il timer per quindici minuti. Linee di colore rosso-rosa devono apparire nella Finestra di Controllo.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Leggere il risultato nella finestra del Test. La comparsa di una linea rosso-rosa indica il risultato positivo per quell'allergene.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Le linee di positività possono essere di colore rosso o rosa.</p>

**Phadia**