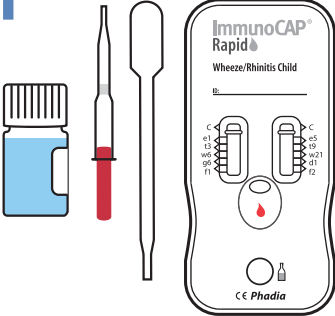
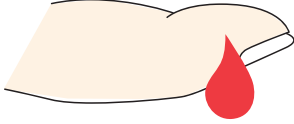
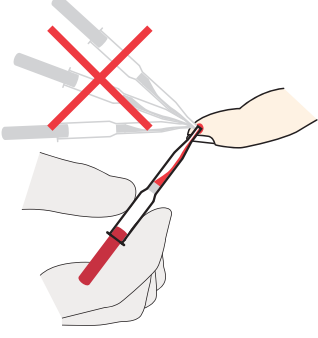
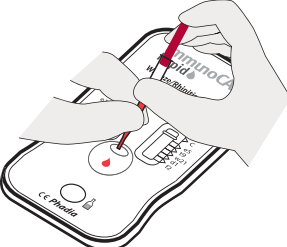
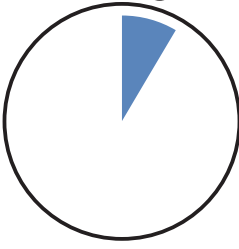
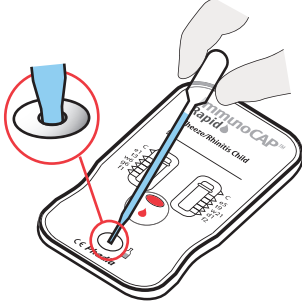
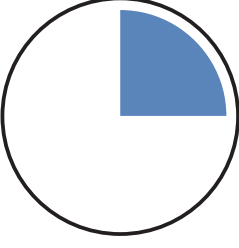
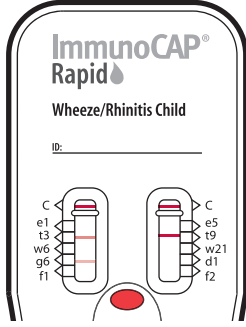



# Testprocedur

<p><b>1</b></p>  <p>Development-lösning, bloduppsamlare, pipett och analysplatta.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Blodflödet ökar om fingret är varmt. Använd en lansett som ger rikligt med blod. Gör ett stick i fingret.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Låt blodet rinna ner i bloduppsamlaren genom att hålla den i vinkel ner från fingret. Håll inte för hålet i änden på den röda delen av bloduppsamlaren.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Lägg analysplattan på ett plant underlag. Håll för hålet i änden på den röda delen av bloduppsamlaren. Tryck försiktigt ut blodet i brunnen som är märkt med en röd bloddroppe.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Ställ en timer på 5 minuter.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Efter 5 min. Tillsätt 0.5 ml development-lösning med den bifogade pipetten. Tryck ner pipetten i botten av brunnen längst ned på plattan märkt med en flaska. Tryck försiktigt på pipettens bubbla.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Ställ en timer på 15 minuter. Ett rosa-rött band skall framträda i de båda kontrollzonerna (märkta med C).</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Läs av resultatet efter 15 minuter. Ett positivt testresultat avläses som ett rosa-rött band bredvid respektive allergenkod.</p>	<p><b>9</b> <i>Exempel på positiva testresultat</i></p>  <p>Ett positivt resultat kan variera i färgintensitet från mörkt rött till ljusrosa.</p>

## Resultat direkt – enkelt och tydligt

### Ett stick i fingret – svar på 20 minuter

ImmunoCAP<sup>®</sup> Rapid visar en allergiprofil för barn och vuxna med symptom så som väsande andning och/eller rinit. Placera blod i brunnen på testplattan, vänta 20 minuter, och läs av resultatet som ett färgat band. Diskutera sedan möjliga behandlingar och fortsatt agerande – innan patienten lämnar mottagningen.

**Phadia**